

YES, WE CARE

#schutzmaskenmitstyle

O-RANGE CARE SCHUTZMASKE Modell: OR2020A

Waschvorgaben

Waschen des Produkts:

Die Filterleistung der Maske bleibt auch bei 8 Waschzyklen unverändert.

1. STUFE - Handwäsche

Es wird empfohlen, die Maske von Hand mit einem milden Reinigungsmittel zu waschen. Trocknen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht.

40°



2. STUFE - Rekonditionieren mit einer hydro-alkoholischen Lösung:

Nach der Behandlung wird eine Rekonditionierung mit hydro-alkoholischer Lösung empfohlen:

1. Reinigen Sie Ihre Hände gründlich.

2. Vermeiden Sie es, die Maske in ihrem innersten Filterbereich zu berühren.

3. Tragen Sie ein neues Paar Einweghandschuhe oder desinfizieren Sie die Hände alternativ mit einer hydro-alkoholischen Lösung (75-85%).

4. Legen Sie die Maske auf eine zuvor gereinigte oder desinfizierte Oberfläche, wiederum unter Verwendung der hydro-alkoholischen Lösung (75-85%).

5. Sprühen Sie die hydro-alkoholische Lösung (75-85%) auf den gesamten Stoff, ohne zuviel zu verwenden: es genügt, diese auf die gesamte Oberfläche des Stoffes aufzutragen.

6. Drehen Sie die Maske um und wiederholen Sie den oben genannten Schritt.

7. Lassen Sie die Maske in einer geschützten Umgebung ruhen, bis der gesamte Trocknungsprozess abgeschlossen ist (mindestens 30 Minuten, wobei die verstrichene Zeit je nach Umgebungsbedingungen variieren kann).

8. Nach Abschluss des Trocknungsvorgangs und Ablauf der genannten Zeit ist die Maske als desinfiziert anzusehen. Vermeiden Sie daher, sie zu kontaminieren, insbesondere in ihrem innersten Filterbereich.

3. STUFE - Spülen

Es wird empfohlen, das Produkt mit frischem Wasser zu spülen, um die restliche hydro-alkoholische Lösung zu entfernen.



REV. 01